

PULSOXIMETRU DEGET ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

PREZENTARE GENERALĂ

- Verificați dispozitivul (în ceea ce privește senzorii și clemele) pentru a vă asigura că nu există daune vizibile care ar putea afecta siguranța utilizatorului sau rezultatele măsurării. Se recomandă verificarea aparatului cel puțin o dată pe săptămână. Dacă sunt daune vizibile, nu mai utilizați aparatul.
- Nu încercați să reparați produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare și reparații.
- Aparatul nu poate fi utilizat împreună cu alte dispozitive care nu sunt specificate în acest manual.
- Pericol de explozie – NU utilizați aparatul în medii cu gaze inflamabile cum ar fi agenți anestezici inflamabili.
- NU utilizați aparatul dacă pacientul este sub scanare RMN sau CT.
- O senzație incomodă sau dureroasă poate apărea dacă utilizați aparatul continuu în același loc mai mult timp. Este recomandat ca aparatul să nu fie aplicat în aceeași locație mai mult de două ore. Dacă aveți un disconfort, schimbați poziția aparatului.
- NU puneți aparatul pe edem sau țesut sensibil.
- Lumina (lumina infraroșu este invizibilă) emisă de dispozitiv este dăunătoare pentru ochi. Nu priviți direct spre aceasta.
- Trebuie să respectați legile locale când dezafectați produsul.
- Țineți aparatul departe de praf, vibrații, substanțe corozive, materiale explozive, temperaturi ridicate și umezeală.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Dacă aparatul se udă, opriți utilizarea acestuia și nu îl mai utilizați până când nu se usucă complet.
- NU atingeți butonul de pe panoul frontal cu materiale ascuțite.
- NU utilizați aburi de temperaturi foarte ridicate sau aburi de înaltă presiune pentru a dezinfecta aparatul.
- NU utilizați aparatul dacă senzorul este deteriorat.

INSTALAREA BATERIILOR

1. Deschideți compartimentul pentru baterii.
2. Introduceți 2 baterii tip AAA, respectând polaritatea corectă.
3. Închideți compartimentul pentru baterii. Este recomandat să scoateți bateriile dacă nu veți utiliza aparatul o perioadă mai lungă de timp.

INFORMAȚII IMPORTANTE ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Degetul trebuie pus în mod corespunzător.
- Nu agitați degetul. Țineți-l relaxat în timpul măsurătorii.
- Evitați aplicarea dispozitivului pe același membru care este înfășurat cu manșetă pentru măsurarea tensiunii arteriale sau în timpul perfuziei.
- Nu lăsați nimic să blocheze emiterea luminii din dispozitiv.
- Exercițiile puternice și interferența dispozitivului electrochirurgical pot afecta precizia măsurării.
- Folosirea unui lac de unghii sau a altor produse pe unghie poate afecta precizia măsurării.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Perne
2. Buton pornire
3. Afișaj
4. Orificiu de agățat




UTILIZARE


1. Deschideți clemele și puneți degetul pe perne și eliberați clemele.

2. Apăsăți butonul de pornire pentru a începe măsurarea.
3. Dispozitivul începe măsurarea, veți auzi un beep. După 3 secunde, rezultatele măsurătorii vor fi afișate pe ecran.
4. Scoateți degetul, iar aparatul se va opri automat.

DESCRIEREA SIMBOLURILOR AFIȘATE

%SpO₂ – Saturația de oxigen

/min – Rata pulsului (bătăi per minut)

 Indicator baterie descărcată

CURĂȚARE

- Curățați aparatul cu un material textil moale, cu soluție, cum ar fi alcool izopropilic 75%.

Atenție: Nu sterilizați prin iradiere cu abur su oxid de etilenă.

ÎNTREȚINERE

Pentru a asigura o durată lungă de viață a aparatului, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:

- Încărcați bateriile când este afișat indicatorul pentru baterie descărcată.
- Curățați suprafața dispozitivului înainte de utilizare.

Atenție:

- Nu introduceți dispozitivul în lichide.
- Este recomandat ca dispozitivul să fie păstrat într-un mediu uscat. Umiditatea poate reduce durata de viață a aparatului sau îl poate deteriora.

DEPANARE

- SpO₂ și rata pulsului sunt instabile – Asigurați-vă că degetul este introdus corect. Revizualizați secțiunea "Informații importante înainte de utilizare".
- Dispozitivul nu pornește – Verificați dacă bateriile sunt introduse corect.
- Afișajul este gol - Verificați dacă bateriile sunt introduse corect.

SPECIFICAȚII

Alimentare: 2 baterii tip AAA, 1.5V

Tensiune alimentare: 3 V

Curent de funcționare: ≤40mA

Parametrii SpO₂: interval de măsurare: 35%-100%, precizie: 70%-100% ± 3%

Rata pulsului: interval de măsurare: 30 bpm – 240 bpm, precizie: ±2bpm sau ± 2%

Temperatura de funcționare: 5°C-40°C

Umiditate: 30%-80%

Presiune: 70kPa – 106kPa

Rezistența la interferențe 50Hz/60Hz

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

